


Fiche technique

04.5081P
à
04.5083P

Matelas d'aide à la prévention des escarres
Matelas PHARMA PLOTS - Classe I

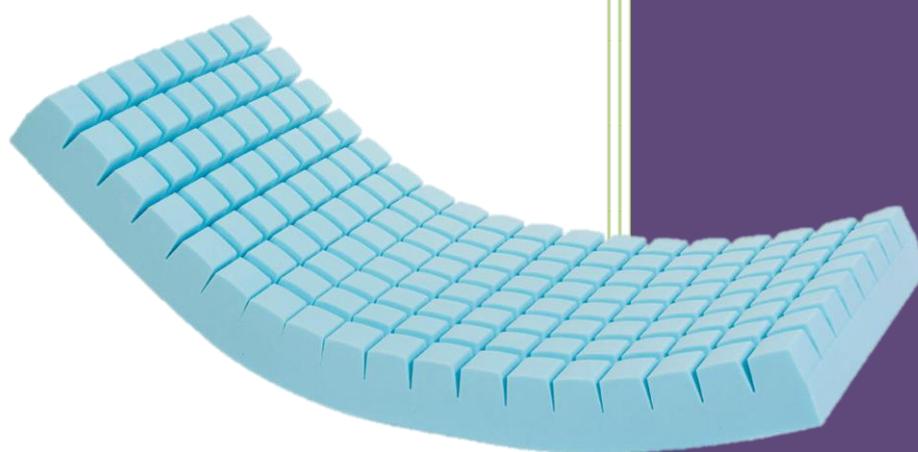

Pharmaouest
PREVENTIX

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION



INFORMATIONS NECESSAIRES AU PATIENT ET A SON ENTOURAGE

Ce matelas est un support d'aide à la prévention des escarres, il vous a été prescrit car votre état de santé réduit votre mobilité et vous expose au risque d'escarre.

Définition de l'escarre : Une escarre est une lésion cutanée, d'origine ischémique, liée à une compression excessive et prolongée des tissus mous entre certaines parties du corps et un plan d'appui. Cette pression excessive et continue peut entraver la circulation sanguine et générer la formation d'une escarre.

L'escarre peut prendre plusieurs formes : une simple rougeur persistant plus d'une journée, une induration de la peau, une plaie plus ou moins profonde pouvant dans les cas les plus graves atteindre les muscles ou l'os sous-jacent.

Fonctionnement du support : Ce support réduit la pression d'appui et permet une meilleure circulation sanguine dans les tissus cutanés et sous-cutanés, dans le but de contribuer à la prévention de l'escarre.

Conseils d'utilisation et précautions d'emploi : Attention, un support à lui seul ne suffit pas à prévenir l'escarre, d'autres mesures de prévention sont également indispensables :

- changer de position au moins toutes les 2 à 3 heures
- alterner avec une verticalisation statique ou dynamique si cela est possible
- maintenir l'hygiène de la peau et éviter la macération
- en cas d'incontinence, changer régulièrement les protections
- observer ou faire observer quotidiennement l'état cutané
- s'assurer que l'alimentation est suffisante et adaptée
- boire régulièrement et en quantité suffisante
- utiliser des dispositifs de prévention additionnels si nécessaire


Si une de ces mesures ne peut être suivie, il est indispensable d'en avertir au plus tôt votre médecin ou votre infirmière. Signalez au plus tôt à votre médecin ou à votre infirmière tout événement anormal comme par exemple de la fièvre, des douleurs ou encore des rougeurs ou le blanchiment des points d'appuis (tête, épaule, dos, hanche, omoplate, bassin, talon, etc.)

L'utilisation d'un support d'aide à la prévention de l'escarre s'accompagne d'une éducation thérapeutique de la personne équipée de ce dispositif et de son entourage. Celle-ci doit être assurée par un professionnel de santé intervenant à domicile ou en établissement. Un carnet de suivi des préconisations et des gestes préventifs peut être créé pour y consigner les actions de prévention.


Il est important de limiter au maximum les surépaisseurs entre le corps et le support, à l'exception du vêtement de corps et d'un éventuel change complet. Préférer des vêtements de corps en coton peu serrés et si possible sans couture en regard des zones d'appui. Ne pas intercaler : serviette ou drap pliés, coussin surajouté, etc. Veiller à l'absence de tout corps étranger comme : tubulures, miettes, corps gras, etc.

Pour des raisons d'hygiène, chaque support d'aide à la prévention de l'escarre doit être réservé à **une seule personne**.

L'efficacité du matelas dépend aussi du bon positionnement de la personne.

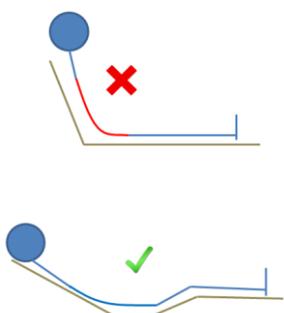

Attention aux surpressions et aux risques de cisaillement liés à une assise trop verticale. Favoriser la position semi Fowler

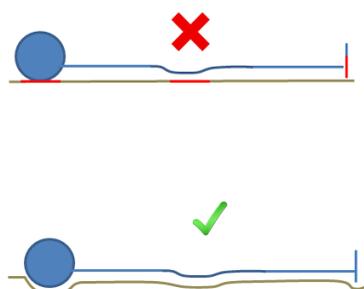

Attention à choisir un support qui permet une répartition des pressions sur la plus grande surface de corps possible. Si besoin, prévoir des décharges sur les zones critiques : Occiput, talons etc...

Description du produit

1. Mousse Polyuréthane Haute Résilience
37 kg/m³

1 →



Fourni avec une housse ou alèse en Dermalon,
Ou une housse en Pharmatex.

Gamme

Références		Dimensions
04.5081P	Avec drap housse Dermalon	88 x 195 x 14 cm
04.5083P	Avec housse Pharmatex	

Principes d'utilisation

Ce matelas d'aide à la prévention des escarres est destiné à des patients présentant des risques faibles à moyend'escarres, alités de 10 à 15 heures par 24 heures, qui se mobilisent seuls avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen.

Ce matelas peut être utilisé comme support de lit d'aide au traitement de l'escarre ou en post-chirurgie d'escarre :

- Chez des patients ayant une ou plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 hors zone d'appui, ou avec possibilité d'exclusion d'appui, patient levé ou non dans la journée.
- Chez des patients avec une escarre de stade 3 ou 4 hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui
- Avec un système de décharge localisée
- Chez des patients avec une escarre de stade 1 ou 2 en zone d'appui, patient levé dans la journée avec un système de positionnement et intervention d'auxiliaires médicaux 3 fois par jour pour vérification de l'installation et réalisation de retournement.

Le matelas PHARMA PLOTS est contre-indiqué :


- Pour les patients qui ne peuvent faire l'objet d'un positionnement alterné
- Pour les patients à risque très élevé d'escarre
- Pour les patients avec des escarres constitués
- Pour les patients de plus de 90 kg

Le matelas Pharma Plots est composé de mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³découpée en forme de gaufrier. Ce matelas permet une modulation des points d'appui et une amélioration de la ventilation. Sa configuration de base permet une meilleure égalisation des points de pression.

La protection permet à la personne de pas être en contact direct avec la mousse pour des raisons d'hygiène et pour éviter tout risque d'échauffement.

Ce matelas doit être utilisé sur les conseils d'un professionnel de santé qualifié. Le choix du support doit prendre en considération le niveau de risque d'escarre selon l'échelle de BRADEN ou de NORTON, le poids de la personne et l'utilisation par le personnel soignant.

ARBRE DECISIONNEL PREVENTION DE L'ESCARRE EN SOINS DE LONGUE DUREE

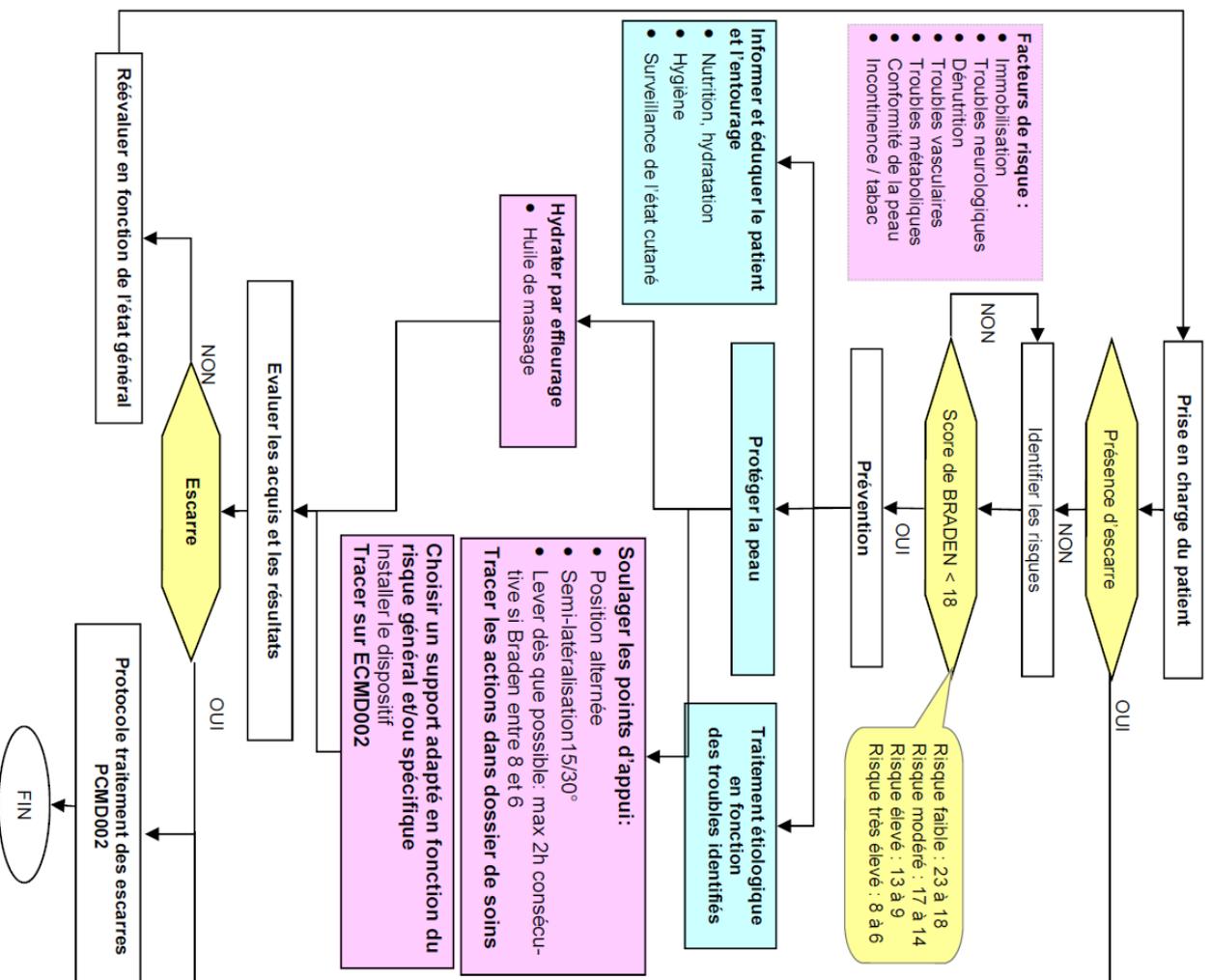

ÉCHELLE DE BRADEN		AJOUTER LES SCORES = CALCUL DU RISQUE GÉNÉRAL					
Communication et perception sensorielle	Sans altération Bonne communication.	4	Légèrement limitées Exprime peu son inconfort. Perception de la douleur ou de l'inconfort (1 à 2 membres).	2	Très limitées Communique son inconfort par gémissement ou agitation. Perception de la douleur ou de l'inconfort altérée sur la moitié du corps ou plus.	1	Null Pas de communication. Déficit sensoriel de tout le corps.
Humidité	Rarement Peau sèche. 4	4	Occasionnellement 1 à 2 changes/jour. 3	2	Souvent 3 changes/jour.	1	Constamment humide 1
Activité	Marche souvent Hors chambre. 4	4	Marche occasionnellement Courtes distances dans la chambre. 3	2	Limitée au fauteuil roulant	1	Limitée au lit 1
Mobilité	Normale Change de position seul et fréquemment. 4	4	Légèrement limitée Quelques changements de position de faible amplitude. 3	2	Très limitées Change peu de position. Toujours aidé.	1	Totalement immobile 1
Nutrition	Alimentation habituelle 4	4	Correcte Mange plus de la moitié des 4 plats protéinés/jour. Accepte les compléments. 3	2	Probablement insuffisante Mange la moitié des 3 plats protéinés/jour. Parfois 1 supplément ou alimentation liquide par tubage < à la quantité optimale.	1	Très insuffisante 1
Frictions et cisaillements	Pas de problème apparent Garde une bonne position au lit ou au fauteuil. Force suffisante pour se soulever lors du transfert. 3	3	Pose potentiellement problème Glisse parfois. Frictions probables lors des mouvements. 2	1	Pose problème Glisse souvent. Repositionnement fréquent. 1	1	1

Conseils d'installation

Pour les matelas livrés compressés, vérifier la « date limite de mise en service » apposée sur le carton. Respecter le temps de décompression qui est de 4 heures.

Vérifier l'adéquation entre les dimensions du matelas, celles du lit et des barrières de lit, et la morphologie de l'utilisateur. Vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre le barreau du bas de la barrière de lit et le haut du matelas. Une distance minimum de 22 cm entre le haut de la barrière de lit et le haut du matelas doit être respectée.

Ne pas poser le matelas sur un autre matelas, mais sur un sommier. Bien vérifier le bon état du sommier en particulier que celui-ci n'est pas affaissé en son centre.

Repérer le sens d'installation du matelas, la partie découpée de la mousse doit se situer sous le patient. Pour la housse en Pharmatex, la bande de protection doit être positionnée de façon à recouvrir la fermeture à glissière qui n'est pas étanche.

Noter la date de mise en service du matelas directement sur la mousse à l'aide d'un marqueur.

Ne pas recouvrir le matelas d'une autre protection que la housse ou protection préconisée par le fabricant.

Installer un drap en coton au-dessus de la housse, ne pas le border afin d'éviter l'effet de hamac.

Assister l'utilisateur lors du premier couché et du premier levé afin de prévenir les chutes.

Précautions d'emploi

Pour le confort de l'utilisateur, utiliser de préférence des vêtements et linges en coton. Proscrire l'utilisation de vêtements et tissus synthétiques qui pourraient par friction provoquer des échauffements, voire entraîner un glissement du bassin sur le lit avec pour conséquence un risque de cisaillement des tissus cutanés et sous-cutanés.

En cas d'incontinence, nettoyer la housse et éventuellement le matelas. Lors des lavages, il est conseillé d'utiliser une housse de rechange afin d'éviter tout contact direct avec la surface du matelas.

Eviter l'utilisation d'objets piquants ou tranchants sur le matelas.

Caractéristiques techniques

Mousse Haute Résilience « Découpée »	Polyuréthane 37 kg/m ³ – Portance 3,5Kpa Classement au feu : M4
Protection en Dermalon 10/100 ^è	100% Polychlorure de Vinyle Grammage : 138 g/m ² Classement au feu : M1
Housse intégrale en Pharmatex	60% Polyuréthane - 40% Polyester Grammage : 120 g/m ² Classement au Feu : CRIB 5
Dessous de housse anti-glisse (pour la housse en Pharmatex)	80% Polychlorure de vinyle - 20% Polyester Grammage : 250 g/m ²
Test de résistance au Feu	EN 597-1 & EN 597-2

Garantie

Ce matelas est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de couleur qui n'affectent pas les qualités d'allègement de pressions.

La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.

Conseils d'entretien

Nettoyage du matelas : Nettoyage à la vapeur saturante sans ajout de formol, produit désinfectant ou eau savonneuse. Bien laisser sécher à l'air libre.

Important : L'alèse ou la housse de protection ne doivent être remplacées qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

Nettoyage des protections

- Alèse / Housse en Dermalon : Housse amovible, lavage en machine à 60°C maximum. Séchage en machine possible à T° modérée (60°C). Il est conseillé de fermer la fermeture à glissière lors des lavages et des séchages. Au quotidien entretien simple de la housse : lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire, bien essuyer.



- Housse en tissu Pharmatex : Housse amovible, lavage conseillé en machine à 60°C, maximum 95°C. Séchage en machine possible à T° modérée (60°C). Il est conseillé de fermer la fermeture à glissière lors des lavages et des séchages. Au quotidien entretien simple de la housse : lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire, bien essuyer.



Conseils de désinfection : Résistance à la désinfection-Alcool dénaturé : 90%+2% Ether. Résiste à : HAC ; Réocid ; Lyorthol.

Ne jamais utiliser de produits chlorés même dilués pour nettoyer la housse (Javel, Dakin®).

Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de désinfectants corrosifs tels que l'acétone ou de dégraissants industriels afin d'éviter toute dégradation du matériel.

Surveillance et maintenance, réparations éventuelles, remplacement de la housse : Effectuez régulièrement un contrôle visuel de la housse pour repérer les éventuels trous ou traces d'érosion. Et contactez votre revendeur en cas de détérioration anormale.

Stockage / Recyclage :

Stockage du produit : **Stocker à l'abri de la lumière, de la chaleur, dans un endroit sec et à plat.**

Conditions de température : MINI : -10° C / MAXI : +40° C

Taux d'humidité : MINI : 30% / MAXI : 95%

Elimination du produit : Ne pas brûler ou jeter dans la nature le produit usagé, le déposer dans une déchetterie qui le prendra en charge.

DISTRIBUTEUR:

Pour tout problème de service après-vente, merci de contacter votre distributeur.

FABRICANT:

PHARMAOUEST INDUSTRIES PREVENTIX
Z.A. ACTIPOLE 35 – B.P. 12
2, rue de Saint-Coulban
F- 35540 MINIAC-MORVAN
Tél. : 02 99 82 21 21
Fax : 02 99 82 15 45
www.pharmaouest.com
service.qualite@pharmaouest.fr